

SM 2 Universal

SM 2 500

***Für die Applikation
von Händedesinfektionsmitteln,
Wasch-
und Pflegeelotionen***



SM2 Universal - passend für Flaschen von 450 ml bis 1.000 ml

SM2 500 - passend für Flaschen 450 / 500 ml

- Verstellbarer Dosierhub von ca. 1 ml bis 3 ml
- Herausnehmbare Pumpe
- Formschöner, robuster Kunststoffspender
- Betätigungshebel für Arm oder Ellenbogen
- Ständige Füllstandskontrolle möglich
- Einfache Montage

Präparate-Spender SM 2 Universal / SM 2 500

Schülke & Mayr



Beschreibung

Einfache und exakte Dosierung von Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotionen.

- Dosierte die benötigten Präparatemengen durch den verstellbaren Dosierhub in Mengen von ca. 1 ml bis ca. 3 ml je Hub.
- Pumpsystem und Auslaufventil sind aufeinander abgestimmt und berücksichtigen die unterschiedlichen Viskositäten der Präparate.
- Kein Nachtropfen, kein Auslaufen, kein Eintrocknen.

Auslaufventil

Das Auslaufventil ist so konzipiert, dass erst bei Freigabe der großen Öffnung das Produkt ausfließt. Hierdurch wird ein scharfer Strahl vermieden, der spritzt. Die zusätzliche Dichtung am untersten Ende der Auslauföffnung verhindert ein Tropfen am geschlossenen Ventil.

Füllstandskontrolle

Durch den transparenten Flaschenkörper jederzeit möglich.

Betätigungshebel

Kann per Ellenbogen oder Unterarm betätigt werden. Der Hebel lässt sich nach oben klappen zum einfachen Austausch der Pumpe und zur Dosiereinstellung.

Produktwechsel

Beim Produktwechsel ist nur die Einwegflasche auszutauschen und das einfach herausnehmbare Pumpsystem durchzuspülen.

Das Flaschenetikett ist gleichzeitig Spenderetikett.

Montagehinweise

Standardbefestigung:

- 2 Langlöcher oben und ein Langloch unten.
- Beste statische Befestigung für Präparate-Spender: Durch T-Anordnung passend in allen Kachelfugen.
- Lochbild in der Gehäuserückwand ist für alle gängigen Spenderbefestigungen geeignet.

SM 2 Universal (450 – 1.000 ml)

668500

SM 2 500 (450 – 500 ml)

668600

Zubehör

- Schalenhalter SM 2 Universal/500 - Art.-Nr. 668501
- Schale für Schalenhalter - Art.-Nr. 669301
- Klammer für Schalenhalter - Art.-Nr. 669302
- Ersatzpumpe, komplett - Art.-Nr. 668540

Technische Daten


Präparatebehälter: 450 ml – 1.000 ml (SM 2 Universal)
450 ml/500 ml (SM 2 500)

Dosierung verstellbar: ca.1 ml bis ca. 3 ml


Füllstandskontrolle: ständig durch transparenten Behälter

Werkstoffe: Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Metallteile aus Edelstahl

Abmessungen SM 2 Universal:

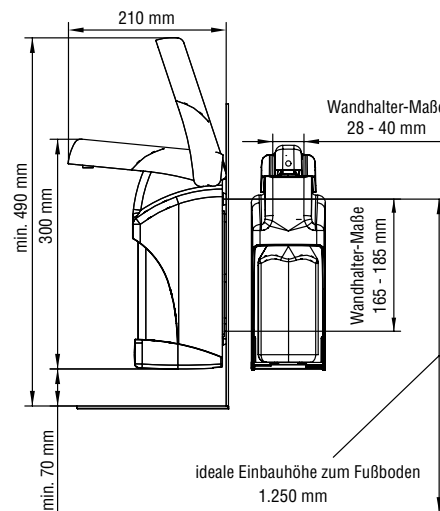

Abmessungen SM 2 500:

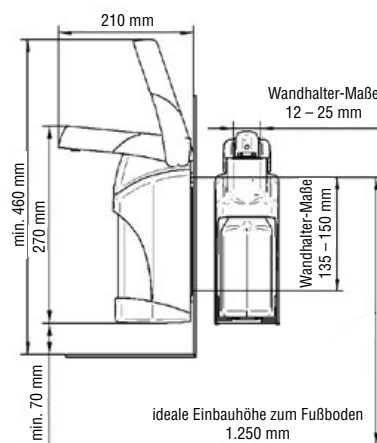

Zubehör: Schalenhalter

