

# DESCO BOHRERBAD

- ✓ aldehydfrei
- ✓ phenolfrei

gebrauchsfertiger Desinfektionsreiniger für rotierende Instrumente

- mit Korrosionsschutz
- für den Einsatz in Ultraschallbädern
- sehr reinigungsstark



CE 0482

## PRÄPARATETYP

Selbsttätig reinigendes, gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für zahnärztliche Bohrer und andere rotierende Präzisionsinstrumente. Auf der Basis von Kaliumhydroxid, speziellen Lösungsmitteln und Korrosionsinhibitoren. Biologisch abbaubar.

**DESCO BOHRERBAD** erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit bzgl. der Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen in humanmedizinischen Einrichtungen (TRGS 525/540).

## ANWENDUNGSBEREICHE

Für die manuelle Desinfektion und Reinigung von Bohrern, Fräsern, Diamantschleifern und anderen rotierenden Präzisionsinstrumenten.

## ANWENDUNG

Instrumente sofort nach Gebrauch ohne vorherige Reinigung in die unverdünnte Lösung einlegen. Deckelgefäße verwenden. Nach 5 Minuten ist der Desinfektionsvorgang beendet, so dass die Instrumente aus der Lösung genommen werden können. Danach sorgfältig mit klarem Wasser abspülen und abtrocknen.

## WIRKUNGSSPEKTRUM

**DESCO BOHRERBAD** wirkt:

- bakterizid inkl. MRSA
- tuberkulozid
- fungizid (C. albicans), levurozid
- virusinaktivierend inkl. HBV, HIV, BVDV, HCV, Vaccinia-Viren

## EINWIRKZEIT

- Gebrauchsfertige Lösung ! Nicht verdünnen! -

**bakterizid inkl. Tbc/MRSA, fungizid**

DGHM/VAH

geprüft bei erhöhter Belastung: konz. 5 Min.

**wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. HBV/ HIV/Vaccinia/ HCV / BVDV**

(begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung) konz. 5 Min.

## ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g Lösung sind enthalten:

2,0 g Kaliumhydroxid

## CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

**Aussehen des Konzentrates:** klare, farblose Lösung

**pH-Wert, Konzentrat:** 13,5 +/- 0,5

**Dichte (20°C):** 1,006 +/- 0,005 g/ml

## LIEFERFORMEN

| Einzelpackung | Verkaufseinheit | PZN | Art.-Nr.   |
|---------------|-----------------|-----|------------|
| 2 L Flasche   | 6 x 2 L         | -   | 00-803-020 |
| 5 L Kanister  | 3 x 5 L         | -   | 00-803-050 |

## DOSIERHILFEN

Dosierpumpe für 2-Liter-Flasche und 5-Liter-Kanister  
Kanisterumfüllhahn, Kanisterschlüssel.



# **DESCO BOHRERBAD**

*gebrauchsfertiger Desinfektionsreiniger für rotierende Instrumente*

## **BESONDERE HINWEISE**

Keine Aluminiumteile einlegen. Lösung nur unverdünnt anwenden.  
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen. Dämpfe können Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Etikett vorzeigen).

Bei nicht für die Haut bestimmten Desinfektionsmitteln ist das Tragen von Schutzhandschuhen von den Berufsgenossenschaften vorgeschrieben.

## **GUTACHTEN**

**Prof. Dr. Schubert**, Hygieniker, Frankfurt/M.:  
Gutachten zur Instrumentendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtlinien vom 09.12.2003.

**Prof. Dr. Werner**, Hygieniker, Schwerin:  
Gutachten zur Instrumentendesinfektion nach DGHM/VAH-Richtlinien vom 13.12.1996.

**Dr. Steinmann**, Virologe, Bremen:  
Gutachten zur BVDV-Wirksamkeit (HCV) vom 09.10.2001.  
Gutachten zur Vacciniavirus-Wirksamkeit vom 05.10.2006.

## **REGISTRIERUNG / ZERTIFIZIERUNG**

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der DGHM/VAH.  
Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

