

DESCO CLEANER

Reinigungspulver für Instrumente

- hervorragende Reinigungskraft
- besonders für den Einsatz im Ultraschallbad geeignet
- schnell wirksam



CE

PRÄPARATETYP

DESCO CLEANER ist ein Pulverreiniger zur selbsttätigen und äußerst gründlichen Schnellreinigung von Instrumenten und Geräten aus Metall, Kunststoff, Keramik, Glas und Porzellan.

Bei hoher Schmutzbelastung mit Eiweiß- und Blutresten ist **DESCO CLEANER** der ideale Pulverreiniger für alle medizinischen Bereiche und Labors.

ANWENDUNGSBEREICHE

DESCO CLEANER kann angewendet werden bei chirurgischem Instrumentarium wie Nierenschalen, Pinzetten, Scheren und Zangen, bei Inhalierapparaten, Kunststoffmaterialien, Laborgläsern, Mörsern, Porzellan, Schläuchen, Standflaschen, Waschschüsseln, Zählkammern und zahnärztlichem Instrumentarium.

ANWENDUNG

Zu reinigendes Material sofort nach Gebrauch in die Reinigungslösung einlegen und 10-20 min. einwirken lassen. Sämtliche zu reinigende Oberflächen und Hohlräume müssen vollständig benetzt sein. Bei hartnäckiger Verschmutzung die Dosis und/oder die Einwirkzeit erhöhen.

Die Lösung wird je nach Grad der Verschmutzung erneuert. Die Instrumente sind nach der Entnahme aus der Lösung gründlich mit Wasser abzuspülen.

DESCO CLEANER eignet sich auch für den Einsatz in Ultraschallgeräten.

DOSIERUNG

je nach Verschmutzung 0,5 % - 1 %

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Form/Farbe: Pulver, hellgrün
pH-Wert, 1 % - ige Lösung: 12 + / - 0,5

ZUSAMMENSETZUNG

Inhaltsstoffe unter Berücksichtigung der Detergentienverordnung: nichtionische Tenside (< 5 %), anionische Tenside (5 - 15%), Phosphate (> 30 %)

Die im Produkt enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar gem. EU- Detergentienverordnung.

LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
1 kg Dose	6 x 1 kg	-	00-115-010
5 kg Eimer	1 x 5 kg	-	00-115-050

DOSIERANLEITUNG

Zur Herstellung einer
0,5 % - igen Lösung: 1 Messlöffel auf 6 Liter Wasser
Zur Herstellung einer
1,0 % - igen Lösung: 1 Messlöffel auf 3 Liter Wasser

DOSIERHILFEN

Messlöffel.

BESONDERE HINWEISE

Verursacht Verätzungen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Kein Zusatzreiniger! Als Zusatzreiniger für die Instrumentendesinfektion nur in Verbindung mit **DESCOTON FORTE** und **DESCOTON PLUS** anwenden. Die Standzeit beträgt dann 1 Tag.

REGISTRIERUNG / ZULASSUNG

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

