

INSTRU CLEAN

Instrumentenreiniger - Pulver

PRÄPARATETYP:

INSTRU CLEAN ist ein schnell reinigendes Pulver für sämtliches medizinisches Instrumentarium und Laborgegenstände. Auch zur Anwendung im Ultraschallgerät geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Schnell und gründlich reinigend, löst auch hartnäckige Verschmutzungen wie Blut, Eiweiß, Sekrete und Fette
- Gute Wasserlöslichkeit, auch in kaltem Wasser
- Materialschonend
- Angenehm im Geruch
- Umweltfreundlich, biologisch abbaubare Tenside

ANWENDUNGSBEREICHE:

Alle klinischen Bereiche, in denen Instrumentarium und Laborgegenstände zu reinigen sind. Ärztliche und zahnärztliche Praxen.

ANWENDUNG:

Zu reinigendes Instrumentarium sofort nach Gebrauch einlegen. Instrumentarium nach 10 min. entnehmen und mit Wasser abspülen.

DOSIERUNG:

0,5 % – 1,0 % je nach Grad der Verschmutzung.

ZUSAMMENSETZUNG:

NTA-Na-Salz, Soda, m-silikat, nicht-ionische Tenside

TOXIKOLOGIE:

Akute Toxizität:

LD 50 \geq 4000 mg/kg Ratte oral

Lokale Verträglichkeit:

Gute Hautverträglichkeit in der Anwendungskonzentration beim Kurzzeitkontakt.

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Aussehen des Produktes:

Rieselfähiges, weißes Pulver

Aussehen der Gebrauchslösung:

Klare Lösung

pH-Wert – 1%-ige Gebrauchslösung in Leitungswasser: ca. 12

Dichte 20°C: 0,90- 0,95

LIEFERFORMEN: CE

10 x 1-kg-Dosen

5-kg-Eimer

Zur Beachtung:

INSTRU CLEAN ist keine gefährliche Zubereitung nach den EG-Richtlinien. Ein EG-Sicherheitsdatenblatt ist daher nicht erforderlich.

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z.B. in Hinblick auf Materialverträglichkeit sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen.